



## 褥瘡対策に関する診療計画書にある危険因子

自立体位変換  
(寝返り)

病的骨突出

浮腫  
(局所以外の部位)

関節拘縮

皮膚湿潤  
(多汗/尿・便失禁)

栄養状態低下

## 床ずれの有無

## NPUAP分類(2007年)

ステージⅠ




ステージⅡ

ステージⅢ

ステージⅣ

ポケット  
褥瘡

術後

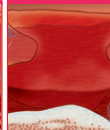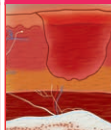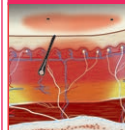OH  
スコア  
レベル床ずれなし  
予防

中等度

中等度

中等度

中等度

中等度

中等度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

## OHスケール

| 評価項目 |               | 判定  |         |      |
|------|---------------|-----|---------|------|
| 1    | 自立体位変換        | できる | どちらでもない | できない |
|      |               | 0点  | 1.5点    | 3点   |
| 2    | 病的骨突出<br>(仙骨) | なし  | 軽度・中等度  | 高度   |
|      |               | 0点  | 1.5点    | 3点   |
| 3    | 浮腫<br>(むくみ)   | なし  | あり      |      |
|      |               | 0点  | 3点      |      |
| 4    | 関節拘縮          | なし  | あり      |      |
|      |               | 0点  | 1点      |      |
| 合計   |               | 点   |         |      |

## OHスコアレベル


|       |         |
|-------|---------|
| 0点    | 危険要因なし  |
| 1～3点  | 軽度 レベル  |
| 4～6点  | 中等度 レベル |
| 7～10点 | 高度 レベル  |

## 2. 病的骨突出の判定基準


- 0cm以下なら「なし」



- 0～2cm未満なら「軽度・中等度」

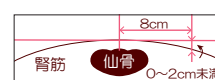

- 2cm以上なら「高度」

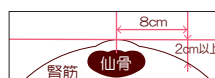

## 3. 浮腫(むくみ)の判定基準





# 床ずれ防止用具

【単位:cm】

## ●夢柔カグラン・スイート

オリジナル  
仕様

静止型

ムレ  
防止

厚さ10cm



83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:6.8(7.7)kg

株式会社トーカイ

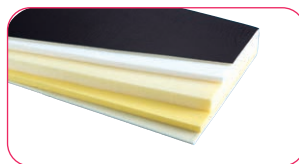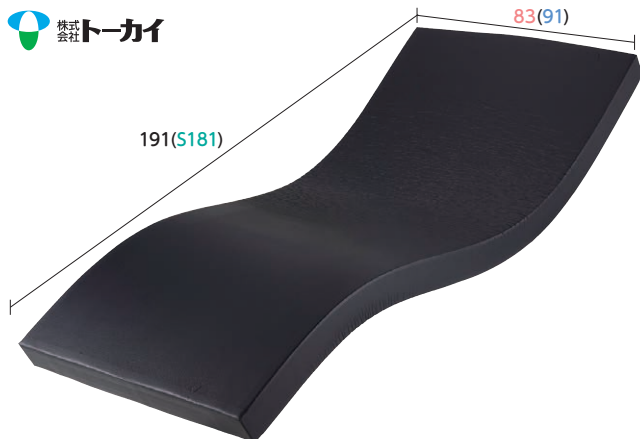透湿・  
防水性

床ずれの原因のひとつである不快な蒸れだけを透過する高機能フィルム。液体はもちろん、どんな菌やウィルスも通しません。



■品番:GS830100 / GS910100

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

不快なムレだけを透過するフィルムで全体ラミネートされた、適度な反発力と体圧分散性を持ったリバーシブルマットレスです。

## ●アルファプラL

Taica

静止型

ムレ  
防止

厚さ10cm

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:6.9(7.6)kg



押し返すような感覚で立ち上がりを支援します。



■品番:MB-LW3R / MB-LW1R

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行い、高弾力で動きやすいマットレスです。背あがり時にはアルファゲルがお尻を支えて安定させ、底付きを防止します。

## ●キュオラ

LOVING CARE  
CAPE

静止型

ムレ  
防止





厚さ10cm

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:6.5(7.0)kg

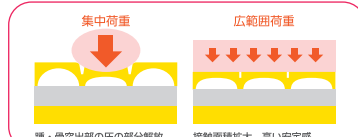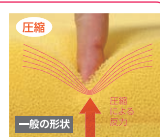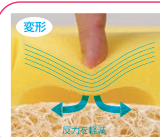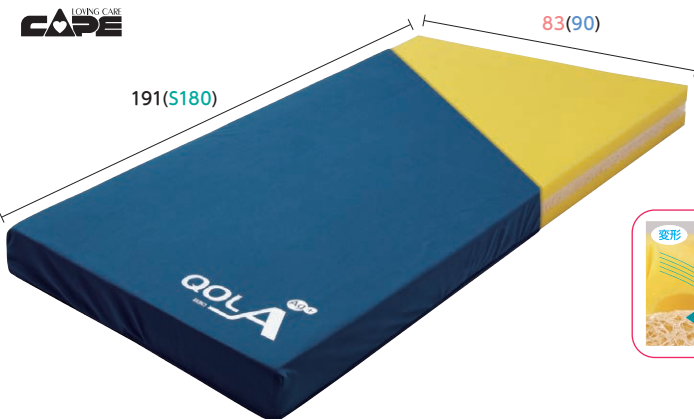

■品番:CR-590 / CR-591

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

中間層に安定感のあるプレスエアー®を組み合わせることで、表面の体圧分散機能を活かしながら動こうとする力をサポートします。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

## ●アルファプラフ

Taica



静止型

ムレ  
防止


厚さ13cm

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量: 8.7(9.5)kg

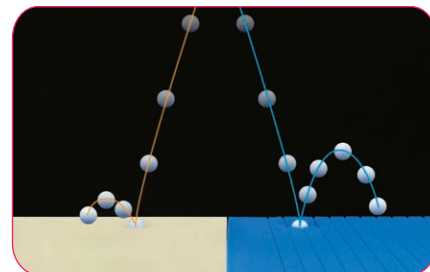

■品番: MB-FW3R / MB-FW1R

柔らかいのに弾力があるので、**少ない力**での寝返りや起きあがりをサポートするマットレスです。体重の**軽い方から重い方**まで高い体圧分散効果が得られます。

ご利用者  
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割


円/月

レンタル料金

円/月

## ●ナーセントコンタ

アイ・ソネックス

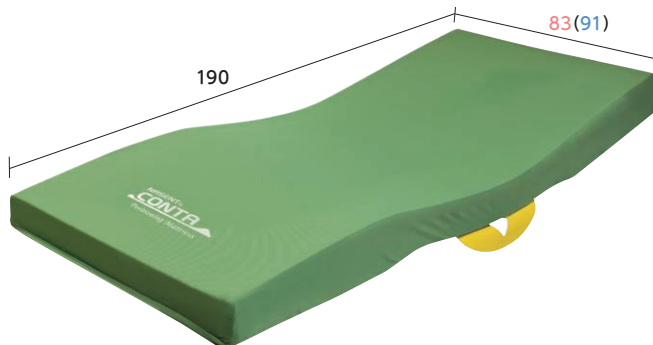

静止型


ムレ  
防止

厚さ11~15cm

83cm幅

90・91cm幅

重量: 7.6(8.3)kg

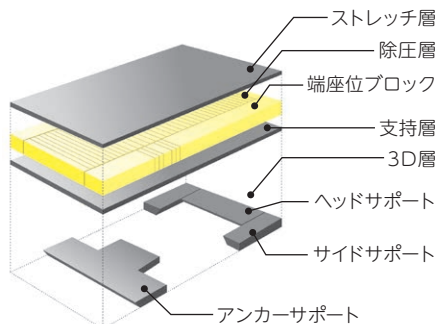

ベッド背上げ時の  
滑りすわりや横倒れを防止



寝位置・座り位置を  
明確にする「ねすわりガイド」

■品番: NCMA-83 / NCMA-91

4層構造の3Dフォームで体圧分散性と姿勢保持を両立。立体形状のサポート部の働きで背上げ時の滑りすわりや横倒れを防ぎます。**ねすわりガイド**により移乗や寝る位置の最適な場所をサポートします。

ご利用者  
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割


円/月

レンタル料金

円/月

## ■ファセットケアマットレス

INOAC

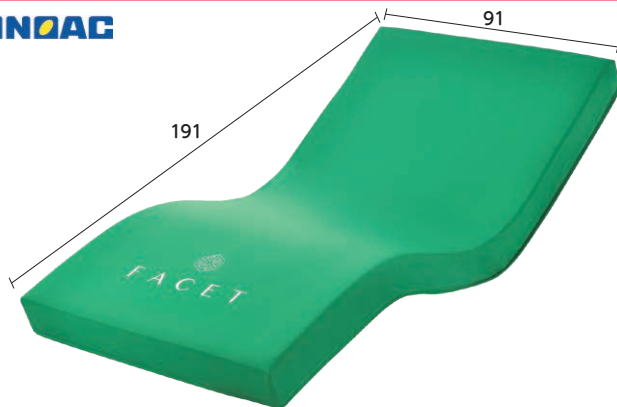


静止型


厚さ12cm

90・91cm幅

重量: 9.0kg

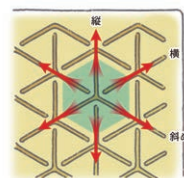

圧力の分散方向

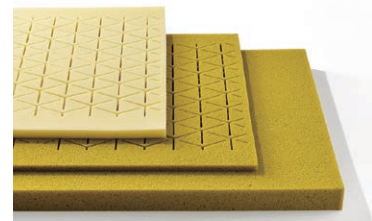

独自の六角形スリットが入った  
ウレタン3層構造

■品番: KG1496

**六角形スリット**が縦・横・斜めからの力を効率よく分散。体圧を吸収しつつ**過度な沈み込み**を抑えることで**寝返り動作**をサポートします。カバー表面には**撥水加工**を施しています。

ご利用者  
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金

円/月



# 床ずれ防止用具

## エアマットの停電時やポンプ不良などの緊急時の対応について

### 【パラマウントベッド】

こちあ利楽  
(P29)



#### 底づきの心配はありません

停電時は空気の排出を自動的に停止します。約2週間空気を保持することができます。ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働きません。

電源復旧後は、停電前の設定が維持されます。

### 【モルテン】

ステージア  
(P30)



オスカー  
(P31)



スコープライト  
(P31)



#### 底づきの心配はありません

長時間の停電で、エアセルの空気が全て抜けてしまったとしても、ウレタンフォームのフィッティングフォーム+底づき防止層があるため、従来のウレタンフォーム系静止型マットレス同等の体圧分散性が確保されています。

ただし、空気が抜けた状態では、目標とする体圧分散性能は発揮されません。

停電復旧後には停電前に設定していた条件に戻ります。

### 【ケープ】

ネクサスアイビー  
(P30)



ビッグセルアイズ  
(P30)



ビッグセル∞  
(P31)



ラグーナ  
(P32)



#### 底づきの心配はありません

災害時などの停電時にエアマットレスの空気漏れを自動で防ぐ機種です。停電と同時に専用ポンプ内の電磁弁が作動してエアセル内の空気漏れを自動で遮断。マットレス全体の内圧を約14日間保持します。ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働きません。

電源の復旧後は、直前の設定に自動復帰します。

※ラグーナの貸与品目は体位変換器です。

※ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働かないため、必要に応じて体位変換を行うなどの対策も必要です。

## ◆こちあ利楽

圧  
切替型

除湿  
効果

厚さ13cm

83cm幅

90・91cm幅

1日あたりの  
電気代  
約2.2円

ショートサイズ有

重量:9.6(10.0)kg



i-fitting (かたさ自動運転機能)  
電源を入れるとすぐに機能します

体重


連動自動調圧

体形

連動自動調圧

背角度

連動自動調圧

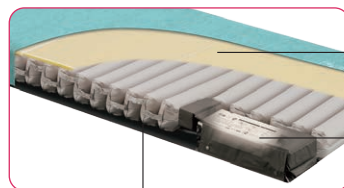

背あげ時にカバーを滑らせることで、  
背部や踵部に生ずるズレを軽減する  
グライドシート

ベッドまわりが邪魔にならない  
ビルトインポンプ

約1cmの薄いトップクッション

■品番:KE-973S / KE-971S

20kgから138kgまでの体重や円背・拘縮などの体形、そして背あげ角度に適したかたさを自動で検知し調整。また背あげ時のズレを軽減するグライドシート、エアマットの凹凸感を和らげるトップクッション付きです。

ご利用者  
負担額

1割  
2割  
3割

円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

## ●マイクロクライメイト ネクサスアイビー

圧  
切替型除湿  
効果

厚さ12cm

83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約5.2円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量: 7.7 (8.1) kg

CAPE

192(S180)  
84(90)マイクロクライメイト対応のファンモーター  
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現

傾斜型2層式エアセル×デュアルフィットセル



■品番: CR-770 / CR-773

接触面の温度・湿度の上昇を抑える「マイクロクライメイト対応システム」搭載。傾斜型2層式エアセルが臀部に斜めにかかる力をしっかりと受け止めて、身体のずり落ちを軽減します。

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|         |    |    |    |     |     |     | 円/月    |

## ●ステージア

圧  
切替型除湿  
効果冷え  
対策

厚さ13cm

83cm幅


1日あたりの  
電気代  
約5.3円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量: 10.0 (11.0) kg

株式会社 モルテン

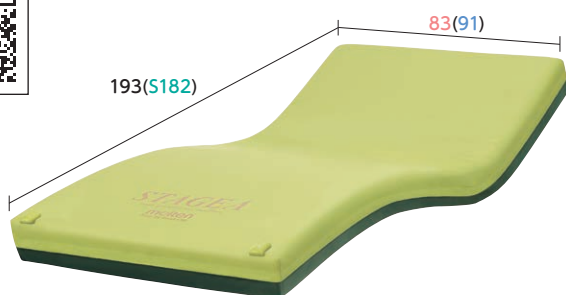

ハイブリッド構造

●長さ方向の断面図



マイクロエアセル

100:50圧切替(残圧制御)

フィッティング層

マイクロエアセルの動きに連動した独自形状の高耐久ウレタンフォーム

底着き防止層

高耐久ウレタンフォーム

■品番: MSTA83 / MSTA91

冷え対策とムレ対策ができる圧切替型のハイブリッドエアマットです。

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|         |    |    |    |     |     |     | 円/月    |

## ●マイクロクライメイト ビッグセルアイズ

圧  
切替型除湿  
効果

厚さ15cm

83cm幅


1日あたりの  
電気代  
約5.2円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量: 6.5 (6.8) kg

CAPE

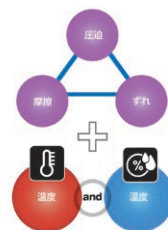192(S180)  
84(90)マイクロクライメイト対応のファンモーター  
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現背上げ角度・時間管理  
アシスト機能

■品番: CR-750 / CR-753

足元に搭載されたファンモーターがマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気。常に効果的な空気の流れを作り出します。背上げ時の角度・時間管理やクイックハードモードによるリハビリ対策などを備えた高機能エアマットです。

| ご利用者負担額 | 1割 | 2割 | 3割 | 円/月 | 円/月 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|--------|
|         |    |    |    |     |     |     | 円/月    |



## 床ずれ防止用具

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

コード  
17-1005コード  
67-1005

【単位:cm】

## ◆ビッグセル∞(インフィニティ)

CAPE

数量限定

圧  
切替型除湿  
効果

厚さ17cm


83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約6.9円

90・91cm幅

ショートサイズ有


重 量:8.3(8.6)kg

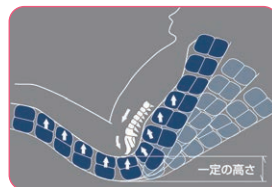背あげ自動内圧  
コントロール

拘縮対応モード




通常モード

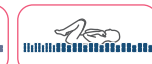

拘縮対応モード

微波動モード

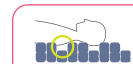

通常モード

微波動モード

屈曲拘縮や病的骨突出などがある利用者に対して高い  
体圧分散性能を発揮します。背あげ時の自動圧力調整  
や換気モードによるムレ対策により、より安楽で快適に  
過ごせる高機能エアマットです。

■品番:CR-550 / CR-555

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

## ●オスカー

株式会社 モルテン

圧  
切替型除湿  
効果冷え  
対策体位変換  
機能

厚さ17cm

83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約5.5円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:12.0(13.5)kg

■体位変換機能



安定支持フォーム



左側臥位



仰臥位



右側臥位



ひざ上げ



セミファウラー位

4つのポジショニングセルで、様々な身体状況に対応する  
自動体位変換機能や体位保持機能付エアマットです。生活  
動作のための安定性と安全性が高く、ムレ対策・冷え対策も  
可能です。

■品番:MOSC83 / MOSC91


ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

## ■スコープライト

株式会社 モルテン

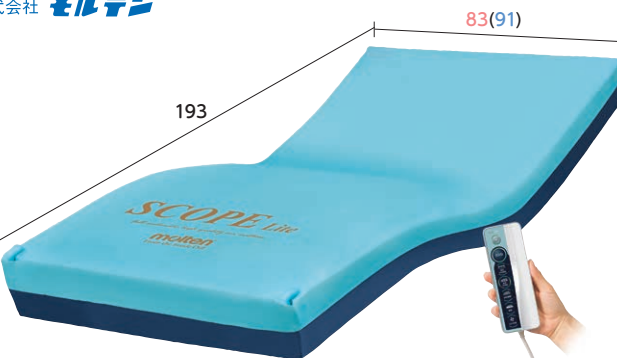圧  
切替型除湿  
効果体位変換  
機能


厚さ17cm

83cm幅

1日あたりの  
電気代  
約2.3円

90・91cm幅

重 量:10(11)kg

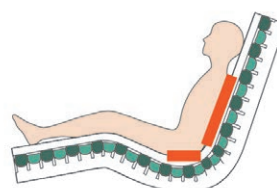

背上げ時の底つき対策・背抜き

臥床時(スタート)

静止-体圧調整

30分間体動がなかったら

除圧-圧切替

30分間体動がなかったら

除圧-体位変換

除圧のための低角度の体位変換



さまざまな身体状態への適応

リモコンの全自動ボタンを押すだけで、状態の変化に合わ  
せてマットレスが自動運転で対応。最適な圧対策を行いま  
す。低角度の体位変換機能付きです。

■品番:MSCPL83 / MSCPL91

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月