



## 褥瘡対策に関する診療計画書にある危険因子

自立体位変換  
(寝返り)

病的骨突出

浮腫  
(局所以外の部位)


関節拘縮

皮膚湿潤  
(多汗/尿・便失禁)

栄養状態低下

## 褥瘡の有無

## NPUAP分類(2007年)

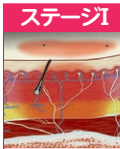

術後

OH  
スコア  
レベル褥瘡なし  
予防

|   |   |   |   |   |   |                 |     |
|---|---|---|---|---|---|-----------------|-----|
| ○ | ○ | ○ |   |   |   |                 | 軽度  |
| ○ | ○ | ○ |   |   |   |                 | 中等度 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |   |   | ○               | 中等度 |
| ○ | ○ | ○ |   |   |   | ○               | 中等度 |
| ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |                 | 中等度 |
| ○ | ○ | ○ |   |   |   |                 | 中等度 |
| ○ |   |   |   |   |   |                 | —   |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○<br>圧切替<br>非設定 | 高度  |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |                 | 高度  |
|   | ○ | ○ | ○ | ○ |   | ○<br>静止設定       | 高度  |
|   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○<br>三段階<br>圧切替 | 高度  |
|   | ○ | ○ | ○ | ○ |   |                 | 高度  |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○<br>静止型        | 高度  |
| ○ | ○ | ○ | ○ |   |   | ○<br>圧切替<br>非設定 | 高度  |

## OHスケール


| 評価項目            | 判定        |                     |            |
|-----------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 自立体位変換        | できる<br>0点 | どちらでも<br>ない<br>1.5点 | できない<br>3点 |
| 2 病的骨突出<br>(仙骨) | なし<br>0点  | 中・軽度<br>1.5点        | 高度<br>3点   |
| 3 浮腫<br>(むくみ)   | なし<br>0点  | あり<br>3点            |            |
| 4 関節拘縮          | なし<br>0点  | あり<br>1点            |            |
| 合計              | 点         |                     |            |

## OHスコアレベル


|       |         |
|-------|---------|
| 0点    | 危険要因なし  |
| 1～3点  | 軽度 レベル  |
| 4～6点  | 中等度 レベル |
| 7～10点 | 高度 レベル  |

## 2. 病的骨突出の判定基準


- 0cm以下なら「なし」

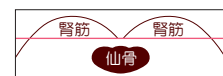

- 0～2cm未満なら「軽度・中等度」

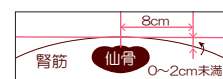

- 2cm以上なら「高度」

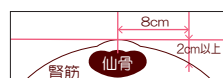

## 3. 浮腫(むくみ)の判定基準





# 床ずれ防止用具

【単位:cm】

## ●夢柔力マット




静止型


厚さ8.5cm

90・91cm幅

重 量:7.0kg

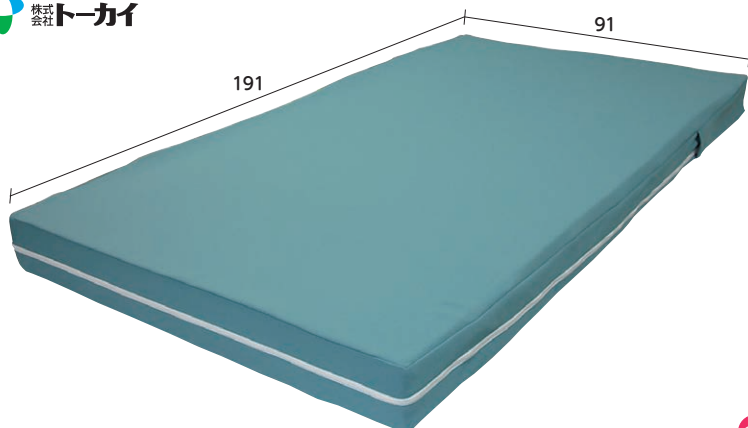

(夢柔力マット断面図)

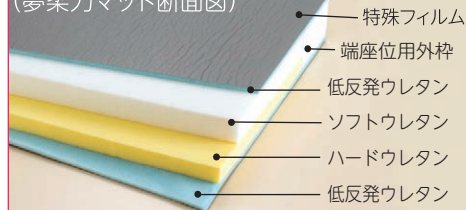

低反発ウレタンを使い体圧を理想的に分散します。また、症状による使い分けができるソフト・ハードの2層構造になっています。

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

## ●アルファプラL

Taica

静止型


ムレ  
防止

厚さ10cm

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:7.6kg

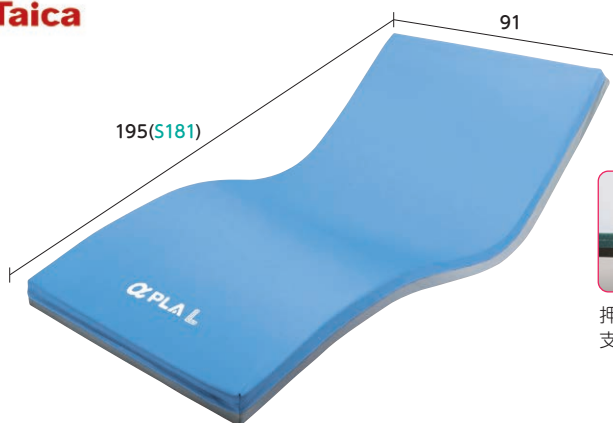

押し返すような感覚で立ち上がりを支援します。



■品番:MB-LW1R

床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行い、高弾力で動きやすいマットレスです。背あげ時にはアルファゲルがお尻を支えて安定させ、底付きを防止します。

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

## ●アルファプラF

Taica

静止型


ムレ  
防止

厚さ13cm

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:9.5kg

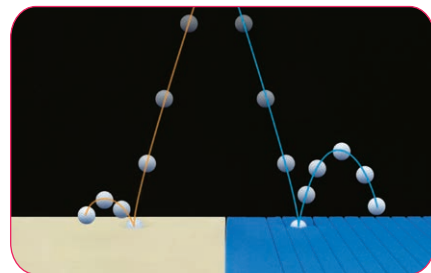

■品番:MB-FW1R

柔らかいのに弾力があるので、少ない力での寝返りや起きあがりをサポートするマットレスです。体重の軽い方から重い方まで高い体圧分散効果が得られます。

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

## ◆ディンプルマットレス

静止型

厚さ12cm

90・91cm幅

ショートサイズ有


重 量: 6.6kg

感染対策も万全な抗菌加工


CAPE

191(S180)

90

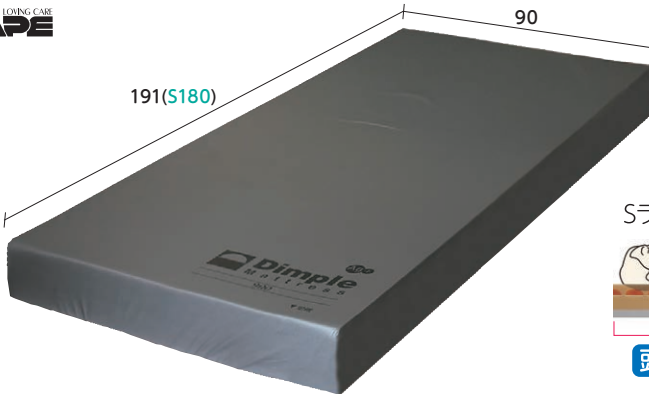

Sライン姿勢保持

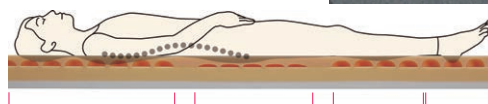

頭部・胸部

腰部

下肢部 踵部

■品番: CR-541

ディンプル形状の空間とスリット加工の複合形状が、踵や骨突出部位はピンポイントで沈み込ませ、大きな部位は接触面積を増やすことで体重バランスに合わせた圧再分配を行います。

ご利用者  
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金

円/月

## ●キューオラ

静止型

ムレ  
防止

厚さ10cm

90・91cm幅





ショートサイズ有

重 量: 7.0kg

CAPE

191(S180)

90

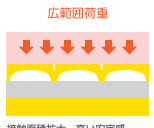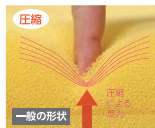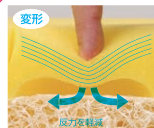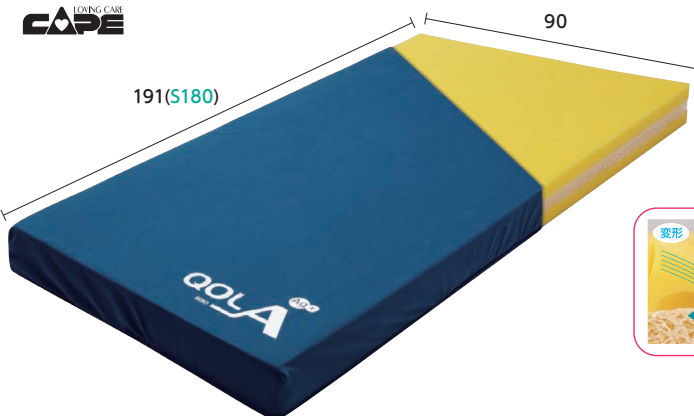

■品番: CR-591

ご利用者  
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金

円/月

中間層に安定感のある**ブレスエアー®**を組み合わせることで、表面の体圧分散機能を活かしながら動こうとする力をサポートします。

## ●ナーセントコンタ

アイ・ソネックス



静止型

ムレ  
防止

厚さ11~15cm

90・91cm幅

重 量: 8.3kg

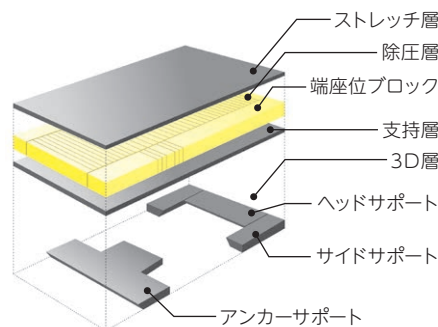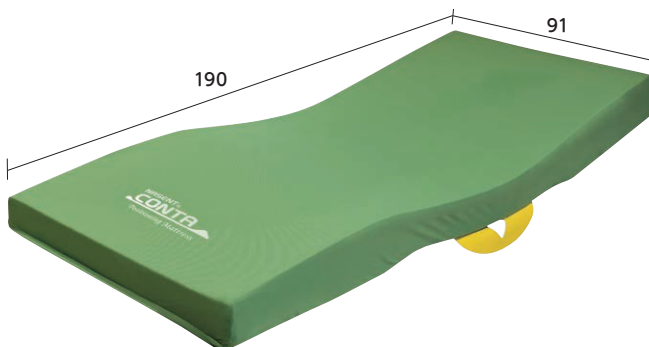

寝位置・座り位置を明確にする「ねすわりガイド」

■品番: NCMA-91

ご利用者  
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金

円/月

4層構造の3Dフォームで体圧分散性と姿勢保持を両立。立体形状のサポート部の働きで背上げ時の滑りすわりや横倒れを防ぎます。**ねすわりガイド**により移乗や寝る位置の最適な場所をサポートします。



# 床ずれ防止用具

## ●ピュアライフエアークラッド

静止型

ムレ  
防止


マットレスの上に置くタイプ

90・91cm幅


厚さ1.5cm

重量:2.4kg

岡部商事(株)

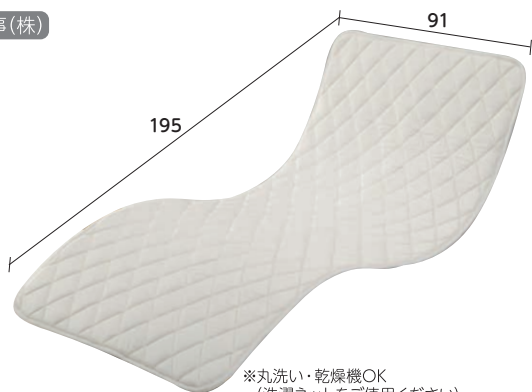※丸洗い・乾燥機OK  
(洗濯ネットをご使用ください)

6層構造

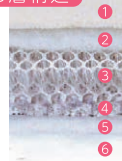

- 1 テクノファイン
- 2 抗菌ポリエステル綿
- 3 フュージョン®  
(通気性、圧力分散効果)
- 4 セミア®S-3 (消臭性)
- 5 制菌ポリエステル綿
- 6 裏地

ピュアライフエアークラッドの  
床ずれ防止メカニズム床ずれ防止マットと組合せが可能です。(ハイブリッド)  
床ずれ防止マットの体圧分散効果を  
妨げずムレを軽減します。

- 体位変換時など沈み込みを防ぎたい時は四隅ゴムをつけて使用。
- 通常は、足元のゴムは外して使用。

■品番:PA2004B

旭化成の素材、テクノファイン(吸汗速乾)、フュージョン(体圧分散と通気性)、セミアS-3(消臭)と制菌綿を重ね合わせ縫製した、床ずれ防止ベッドパッドです。

ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

## ◆こちあ利楽

圧  
切替型除湿  
効果

厚さ13cm

90・91cm幅

1日あたりの  
電気代  
約2.2円

重量:10.0kg

PARAMOUNT BED

i-fitting(かたさ自動運転機能)  
電源を入れるとすぐに機能します体重  
連動自動調圧体形  
連動自動調圧背角度  
連動自動調圧背あげ時にカバーを滑らせることで、  
背部や踵部に生ずるズレを軽減する  
グライドシートベッドまわりが邪魔にならない  
ビルトインポンプ

約1cmの薄いトップクッション

■品番:KE-971S

20kgから138kgまでの体重や円背・拘縮などの体形、そして背あげ角度に  
適したかたさを自動で検知し調整。また背あげ時のズレを軽減するグ  
ライドシート、エアマットの凹凸感を和らげるトップクッション付きです。ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

## ●ステージア

圧  
切替型除湿  
効果冷え  
対策


厚さ13cm

90・91cm幅

1日あたりの  
電気代  
約5.3円

重量:11.0kg

株式会社 モルテン

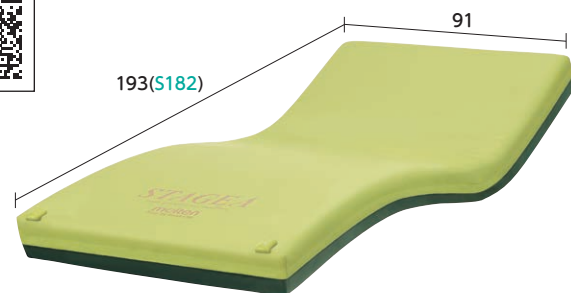

ハイブリッド構造

●長さ方向の断面図



マイクロエアセル

100:50圧切替(残圧制御)

フィッティング層

マイクロエアセルの動きに連動した  
独自形状の高耐久ウレタンフォーム

底着き防止層

高耐久ウレタンフォーム

■品番:MSTA91

冷え対策とムレ対策ができる圧切替型のハイブリッドエア  
マットです。ご利用者  
負担額1割  
2割  
3割円/月  
円/月  
円/月

レンタル料金

円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

[単位: cm]

## ●マイクロライメイト ネクサスアイビー

圧  
切替型除湿  
効果

厚さ12cm

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量: 8.1kg

1日あたりの  
電気代

約5.2円

LOWING CARE  
CAPEマイクロライメイト対応のファンモーター  
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現

傾斜型2層式エアセル×デュアルフィットセル



■品番: CR-773

接触面の温度・湿度の上昇を抑える「マイクロライメイト対応システム」搭載。傾斜型2層式エアセルが臀部に斜めにかかる力をしっかりと受け止めて、身体のずり落ちを軽減します。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ●マイクロライメイト ビッグセルアイズ

圧  
切替型除湿  
効果

厚さ15cm

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量: 6.8kg

1日あたりの  
電気代

約5.2円

LOWING CARE  
CAPEマイクロライメイト対応のファンモーター  
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現背上げ角度・時間管理  
アシスト機能

■品番: CR-753

足元に搭載されたファンモーターがマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気。常に効果的な空気の流れを作り出します。背上げ時の角度・時間管理やクイックハードモードによるリハビリ対策などを備えた高機能エアマットです。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## エアマットの停電時やポンプ不良などの緊急時の対応について

【パラマウントベッド】  
底ぶきの心配はありません

停電時は空気の排出を自動的に停止します。約2週間空気を保持することができます。ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働きません。電源復旧後は、停電前の設定が維持されます。

【モルテン】  
底ぶきの心配はありません

長時間の停電で、エアセルの空気が全て抜けてしまったとしてもウレタンフォームのフィッティングフォーム+底ぶき防止層があるため、従来のウレタンフォーム系静止型マットレス同等の体圧分散性が確保されています。ただし空気が抜けた状態では、目標とする体圧分散性能は発揮されません。停電復旧後には停電前に設定していた条件に戻ります。

【ケープ】  
底ぶきの心配はありません

災害時などの停電時にエアマットレスの空気漏れを自動で防ぐ機種です。停電と同時に専用ポンプ内の電磁弁が作動してエアセル内の空気漏れを自動で遮断。マットレス全体の内圧を約14日間保持します。ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働きません。電源の復旧後は、直前の設定に自動復帰します。

※ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働かないため、必要に応じて体位変換を行うなどの対策も必要です。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※レギュラーサイズ以外の商品情報はお問い合わせください。



# 床ずれ防止用具


福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

コード  
17-1005コード  
67-1005

【単位: cm】

## ■スコープライト

株式会社 モルテン

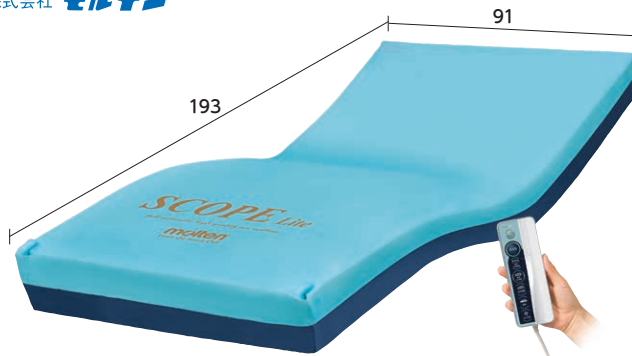
圧  
切替型除湿  
効果体位変換  
機能

厚さ17cm

90・91cm幅

1日あたりの  
電気代  
約2.3円

重 量: 11kg

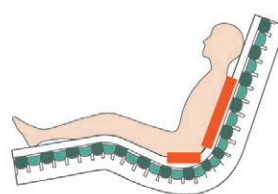

背上げ時の底づき対策・背抜き

臥床時(スタート)

静止・体圧調整


30分間体動がなかったら

除圧・圧切替

30分間体動がなかったら

除圧・体位変換

除圧のための低角度の体位変換

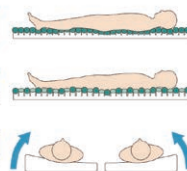

さまざまな身体状態への適応

■品番: MSCPL91

リモコンの全自動ボタンを押すだけで、状態の変化に合わせてマットレスが自動運転で対応。最適な圧対策を行います。低角度の体位変換機能付きです。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ■オスカー

株式会社 モルテン

圧  
切替型除湿  
効果冷え  
対策体位変換  
機能

厚さ17cm

90・91cm幅

1日あたりの  
電気代  
約5.5円ショートサイズ有  
重 量: 13.5kg

安定支持フォーム

■体位変換機能



左側臥位

仰臥位

右側臥位

ひざ上げ

セミファウラー位


4つのポジショニングセルで、様々な身体状況に対応する自動体位変換機能や体位保持機能付エアマットです。生活動作のための安定性と安全性が高く、ムレ対策・冷え対策も可能です。

■品番: MOSC91

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

## ■こちあ利楽 flow(フロー)

PARAMOUNT BED

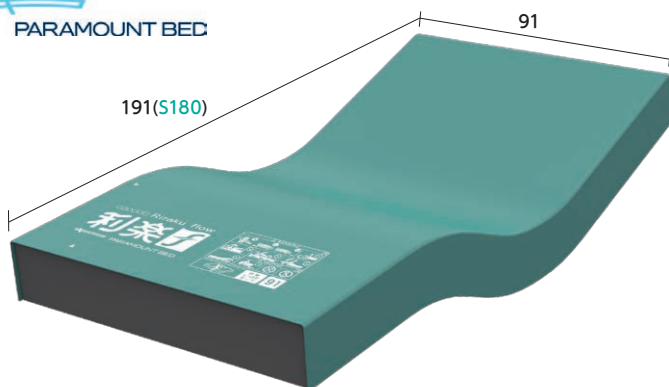
圧  
切替型除湿  
効果体位変換  
機能

厚さ17cm

90・91cm幅

1日あたりの  
電気代  
約2.5円ショートサイズ有  
重 量: 8.5kg

スモールフロー機能(自動体位変換機能)

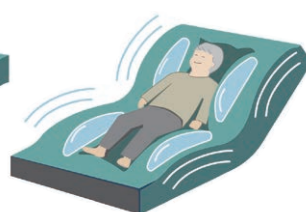

バックサポート機能

■品番: KE-911S

全自動運転のこちあ利楽に自動体位変換機能が付いたエアマットレス。下部にある4つのスモールフローセルが順番に膨張・収縮をゆったりと繰り返すことで、違和感を与えにくい小さな体位変換が可能です。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br>円/月 |
|-------------|----|-----|---------------|
|             | 2割 | 円/月 |               |
|             | 3割 | 円/月 |               |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。